

KEMOT®

**TESTER ALKOHOLU
MIE0214**



Slovenský jazyk

Návod na obsluhu

Obsah:

Úvod	2
Správne požívanie	2
Opis častí	2
Napájanie	3
Operácie	3
Príslušenstvo	7
Chyby a problémy	8
Dôležité poznámky	9
Špecifikácia	9
Kalibrácia	10
Opatrenia	10


Úvod:

Zariadenie je určené na meranie hladiny alkoholu v ľudskom dychu.

Správne meranie:


- Pred testovaním počkajte 15min od posledného vypitia alkoholického nápoja.
- Používajte zariadenie pri teplote 10 stC - 40stC

Opis častí:

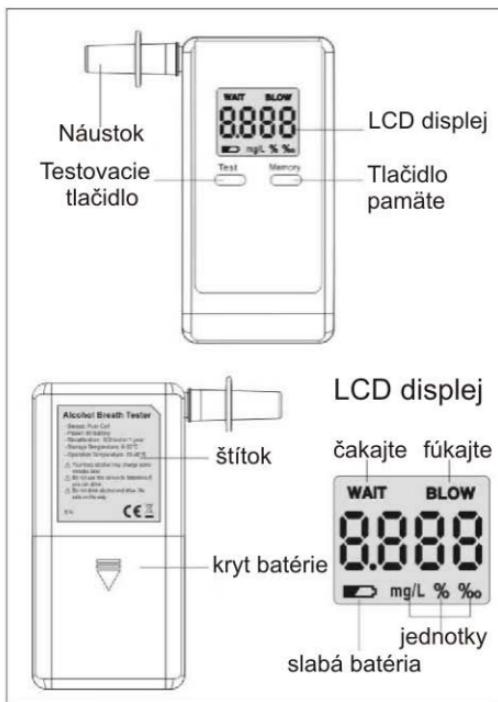

Napájanie:


- Zosunte kryt batérie na zadnej strane zariadenia.
- Vložte 1 kus 9V batéria, dbajte na to aby bola správne umiestnená.
- Ak je slabá batéria zobrazí sa symbol vybitej batérie, vtedy zariadenie nemusí fungovať správne. Je potrebné vymeniť batériu.

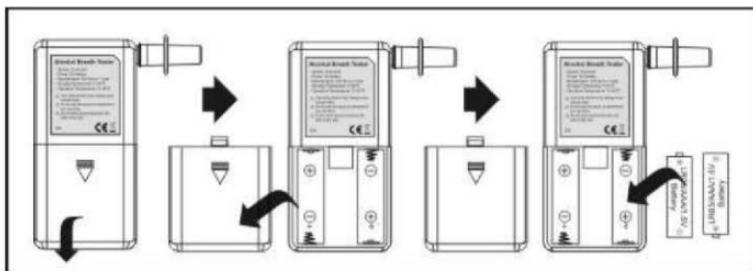


Operácia:

Testovanie


- Vložte náustok do diery pre fúkanie

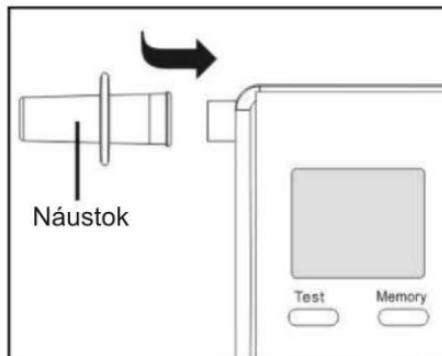


- Stlačte a podržte tlačidlo TEST pre spustenie. Uvoľnite ho po spustení.

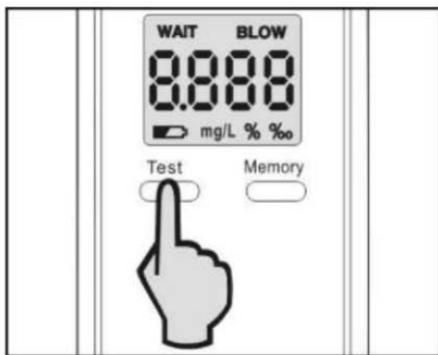

- Na displeji sa zobrazí WAIT je potrebné počkať kým prístroj dosiahne 0.

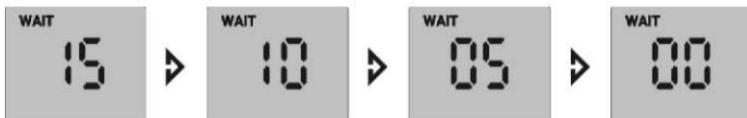


- Keď sa zobrazí BLOW a „0“ bliká hlboko sa nadýchnite a začnite fúkať kým prístroj pípa. Približne 5s.

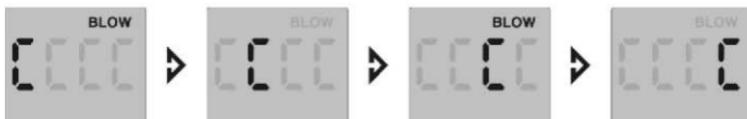



- Zariadenie zobrazuje „WAIT“ a na displeji bliká „0“

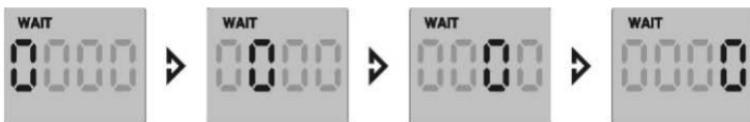


- Výsledok merania bude zobrazený na displeji 20 sekúnd.



- Pri nesprávnom fúkaní sa zobrazí chyba (error).
Prečítajte si časť chyby a problémy.
Zariadenie sa automaticky vypne.



- Po testovaní zaraidenie zobrazuje výsledok merania 20 sekúnd, stlačte tlačidlo MEMORY na skontrolovanie predchádzajúcich meraní.

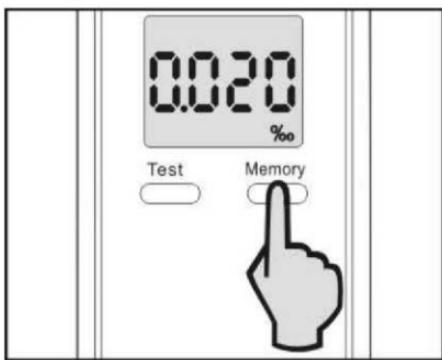

- Zariadenie sa automaticky vypne po 20 sekundách.
- Tlačidlo MEMORY je dostupné len v tomto móde.

Nastavenie mernej jednotky

- Stlačte a podržte tlačidlo MEMORY a potom stlačte tlačidlo TEST pre zapnutie zariadenia.
- Po zapnutí zariadenia uvoľnite tlačidlá.
- Stlačte tlačidlo MEMORY pre výber mernej jednotky, na displeji sa zobrazí: 0,05%(USA), 0,5‰(Európa), 0,25mg/L(Japonsko)

Príslušenstvo:

- Náustky
- Návod na obsluhu

Chyby a problémy

Chybové a problémové hlásenia	Opis	Poznámky
Displej nič nezobrazuje	<ul style="list-style-type: none"> - Stlačte a podržte tlačidlo TEST pre zapnutie. - Skontrolujte batériu. 	
Automatické vypnutie	<ul style="list-style-type: none"> - Slabá batéria - Skončenie periody testu 	
Chyba	<ul style="list-style-type: none"> - zlé fúkanie - zmeniť teplotu prostredia 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Indikátor slabej batérie - Je potrebné vymeniť batériu - Použite alkalickú batériu 	
Zvuk alarmu	<ul style="list-style-type: none"> - Mimo rozsah prístroja - Po 500 testovaniach je potrebné prekalibrovať. 	
HI	<ul style="list-style-type: none"> - Presiahnutie rozsahu displeja - Rozsah displeja: 0,20% BAC (2,00%, 1,000 mg/L) 	

Dôležité poznámky:

- Pred testovaním počkajte 15min po poslednom vypití alkoholu.
- Po odpočítavaní ihned začnite fúkať do zastavenia pípania.
- Funkcia Pamäť dostupná len 20 sekúnd po testovaní.
- Požívajte prístroj len pri teplote 10 - 40 stC.
- Počkajte 30 sekúnd pre opäťovné testovanie.
- Rekalibrácia každých 12 mesiacov.
- Nikdy nenechávajte zariadenie v priestore s obsahom plynu.
- Nikdy nenechávajte zariadenie v slnečnom prostredí.
- Dbajte na to aby zariadenie nespadlo.

Špecifikácia:

- Elektrochemický senzor
- Čas fúkania okolo 6 sekúnd
- 4 segmentový displej s podsvietením
- Rozsah displeja: 0,000-0,200% BAC (2,00‰ alebo 1,00mg/L).
- Zobrazenie „Hi“ po presiahnutí rozsahu
- Odchýlka: +/-0,005% na 0,05%
- Pamäť: 5 posledných meraní
- 5 náustkov v balení
- Testovací čas: 10s
- Opakovanie merania: každých 60 sekúnd
- Výber jednotiek: %,‰, mg/L
- Napájanie: 2xAAA 1,5 alkalické batérie
- Výdrž batérií: 300 meraní
- Teplota: 10stC - 40stC
- Teplota uskladnenia: 0stC-50stC
- Rozmery: 115x60x23mm

Kalibrácia

- Prístroj by mal byť kalibrovaný každých 12 mesiacov alebo každých 500 testovaní. Ak by kalibrácia nebola vykonaná prístroj môže ukazovať nesprávne hodnoty.

Opatrenia:

- Obsah alkoholu vo vašom dychu sa môže po niekoľkých minutách zmeniť.
 - Nepoužívajte prístroj počas vedenia vozidla.
 - Výsledok z tohto zariadenia nie je možné použiť na súde alebo na políciu.
 - Pre Vašu bezpečnosť nepijte alkohol pred vedením vozidla.